



## Ice-Hot Bag Pharmacels

### МЕШОК ДЛЯ ЛЬДА / ГРЕЛКА (Ref 30101, 30102, 30103)

Произведено Pharmacels LLC Valley Cottage, NY 10989, USA

Изделие Ice-Hot Bag Pharmacels идеально подходит для холодовой терапии и тепловой терапии, позволяет легко, удобно и быстро использовать естественную терапевтическую силу холода и тепла.

Применение холодного или горячего компресса помогает облегчить различные боли без использования медикаментозных обезболивающих средств.

Изделие выпускается трех размеров:  
маленького (30101), среднего (30102) и большого (30103).  
Упаковка: 1 изделие, 1 инструкция по применению и уходу в коробке.

#### Показания к применению

##### **Холодный компресс:**

Травмы, растяжения, вывихи, ушибы, синяки;  
Отеки;  
Головная и зубная боль;  
Наружное кровотечение;  
Укусы насекомых.

##### **Горячий компресс:**

Ревматизм и артрит;  
Мышечная боль;  
Боль в спине;  
Периодические боли;  
Головная боль напряжения.

При серьезных травмах и боли неизвестного происхождения, а также при затруднениях в выборе необходимой процедуры (холодовой или тепловой терапии) проконсультируйтесь с врачом перед применением изделия.

#### **Порядок применения в качестве мешка для льда (холодного компресса):**

1. Наполните изделие на 2/3 холодной водой, кубиками льда или ледяной крошкой.
2. Плотно закройте крышку.
3. Приложите мешок к поврежденному участку.
4. По окончании использования удалите содержимое из мешка и, не закрывая крышку, просушите на воздухе.

#### **Порядок применения в качестве грелки (горячего компресса):**

Наполните изделие на 2/3 горячей водой (рекомендованная температура 50-60 °C).  
Плотно закройте крышку.  
Приложите мешок к поврежденному участку.  
По окончании использования удалите содержимое из мешка и, не закрывая крышку, просушите на воздухе.

**Внимание:** Не измельчайте лед внутри мешка! Используйте и храните изделие вдали от колюще-режущих предметов.

**Уход:** Ручная стирка в прохладной воде с использованием мягкого моющего средства. Не используйте отбеливатели или смягчители для тканей. Тщательно ополосните и высушите на воздухе.